

fittydent[®] super HECHTSYSTEEM VOOR GEBITSPROTHESEN

Proficiat: u heeft gekozen voor fittydent. Het volledig fittydent verzorgingssysteem voor gebitsprothesen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met tandartsen en universiteiten om alle mogelijke problemen met betrekking tot uw gebitsprothese op te lossen. fittydent werkt volkomen anders dan alle klassieke hechtmiddelen. fittydent is een echt hechtmiddel dat garant staat voor een krachtige en sterke hechting tussen uw kunstgebit en uw tandvlees, de hele dag lang. De prothese zit perfect en zal niet verplaatsen of schuiven. U zult een compleet nieuw en natuurlijk gevoel ervaren. fittydent is Zink-vrij*.

Super Kleefpasta voor gebitsprothesen

Super Kleefstrips voor onderprothesen

Super Reinigingstabletten



* Veel kleefpasta's bevatten Zink. Chronische en overmatige inname van Zink kan volgens bepaalde onderzoeken resulteren in neurologische aandoeningen. Het betreffende onderzoek "Denture cream an unusual source of excess zinc, leading to neurological disease" is gepubliceerd in Neurology 2008.

Voortaan voelt u zich de hele dag zelfverzekerd met fittydent.

Fabrikant: FITYDENT INTERNATIONAL GMBH, Mühlgasse 4, A-7423 Pinkafeld, Oostenrijk · www.fittydent.com

Distributeur: Ridam Care BV, P.O. Box 10, 3474 ZG De Meern · www.ridam.com

fittydent[®] super KLEEFPASTA

Gebruiksaanwijzing:



1. Reinig uw kunstgebit en laat deze goed drogen. fittydent zal enkel een krachtige hechting verzekeren als het kunstgebit volledig droog is.

2. Breng fittydent aan op uw kunstgebit door lichtjes te drukken op de tube. Verwarm de tube in uw handen als de tube te koud is en u daardoor moeilijk kleefpasta uit de tube kunt drukken.

3. Breng fittydent in strepen aan op uw kunstgebit (zie afbeelding) en zorg ervoor dat de strepen zich niet te dicht bij de rand bevinden.

4. Sluit de tube onmiddellijk na gebruik om te voorkomen dat de opening verstopt raakt.

5. Plaats uw kunstgebit in de mond en druk de kaken stevig op elkaar.

6. Voor een optimaal resultaat wacht u 15 minuten alvorens iets te eten of te drinken.



Praktische tips:

- In het begin is het wat zoeken om de ideale hechting te vinden. Breng om te beginnen een kleine hoeveelheid aan. Vergroot de hoeveelheid geleidelijk tot u de meest duurzame hechting hebt gevonden.
- Als de hechting op het einde van de dag niet afgenomen is, draag uw kunstgebit dan de hele nacht. Breng de volgende dag minder kleefpasta aan.
- Voor een sterkere hechting brengt u de kleefpasta in een fijne en egale laag aan op het volledige contactoppervlak.
- Als u gevoelig tandvlees hebt, kunt u een lichte tinteling of een branderig gevoel ervaren, zonder verdere gevolgen.
- Gebruik regelmatig de fittydent Reinigingstabletten om uw kunstgebit doeltreffend te reinigen.
- Zachte contactoppervlakken kunnen de hechting verminderen.
- Om kleefresten te verwijderen gebruikt u een zachte tandenborstel en warm water.
- Breng regelmatig een bezoek aan uw tandarts om ervoor te zorgen dat uw kunstgebit perfect past.

Samenstelling: Sodium Carboxymethylcellulose, Solution of Polyvinylacetate, Petrolatum.


Bewaren op kamertemperatuur!



Slechts één keer per dag aanbrengen! Minder vaak aan te brengen, dus geldbesparend.

fittydent[®] super KLEEFSTRIPS VOOR DE ONDERPROTHESE

Gebruiksaanwijzing:

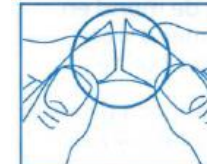

1. Reinig uw kunstgebit voor de onderkaak en laat deze goed drogen alvorens een fittydent kleefstrip aan te brengen.

2. Verwijder de folie aan weerskanten van de strip alvorens de strip aan te brengen. Om de folie gemakkelijk te kunnen verwijderen, buigt u de strip een beetje.



3. Plak de kleefstrip aan de binnenkant van uw ondergebit en druk de strip stevig aan. Verwijder eventuele luchtbelletjes.



4. Knip de strip indien nodig bij met de schaar zodat hij perfect in de prothese past.

5. Plaats het kunstgebit in de mond en druk de kaken stevig op elkaar. Voor een optimaal resultaat wacht u 15 minuten.

Praktische tips:

- Als u gevoelig tandvlees heeft, kunt u soms een lichte tinteling of een branderig gevoel ervaren, zonder verdere gevolgen.
- De fittydent Kleefstrips zijn niet bestemd voor gebitsprothesen met een zacht contactoppervlak.
- Gebruik regelmatig de fittydent Reinigingstabletten om uw kunstgebit doeltreffend te reinigen.
- Breng regelmatig een bezoek aan uw tandarts om ervoor te zorgen dat uw kunstgebit perfect past.

Samenstelling: Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Glycerintriacetate, Petrolatum.

Bewaren op kamertemperatuur!



De enige gegarandeerde oplossing voor problemen met de onderprothese.