

RENEW® is een PROFESSIONELE GEBITSREINIGER en VERWIJDERT:

TABAK, KOFFIE, THEE, KALK, TANDSTEEN, WIJN, PLAK, etc.



GEbruiksaanwijzing: Doe 1 theelepel poeder in een kop warm water. Roer de oplossing stevig in een gebitsbakje.

Dompel uw kunstgebit onder de vloeistof gedurende 20 minuten. Bij extreme aanslag of met een sterke opbouw van tandsteen wordt aangeraden het kunstgebit gedurende één nacht in de vloeistof te houden. **Spoel uw kunstgebit goed af onder stromend water** voor gebruik.

BELANGRIJK: Partiële protheses met metaal en protheses met soft-liner mogen niet langer dan 20 minuten worden ondergedompeld.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN: Renew® is niet om in te nemen. Bij inname niet braken stimuleren, maar drink grote hoeveelheden water. Bel onmiddellijk een huisarts. In geval van direct contact met de ogen of mond moet u ruim spoelen met water. Hou dit product **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN**.

ALLERGISCHE REACTIES: Allergische reacties als gevolg van gebruik van Renew® is niet uitgesloten. In geval van een allergische reactie direct stoppen met gebruik.

NIET GEBRUIKEN om sieraden schoon te maken. **NIET MIXEN** met andere chemicaliën. **VERMIJD** morsen op kleding, stoffen, en werkbladen.