

Ecosym Dag

Deze gel is speciaal voor de dagelijkse hygiëne van uw beugel of gebitsprothese. Let op: alleen voor uitwendig gebruik. Poets dagelijks met Ecosym Dag & Ecosym borstel

Gebruiksaanwijzing:

- neem je prothese / beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water
- doe een paar druppeltjes Ecosym Dag op de prothese / beugel
- poets je prothese / beugel schoon met de Ecosym borstel
- spoel je prothese / beugel goed af met lauw water
- klaar!

Ecosym Week

Voor wekelijkse hygiëne. Verwijdert hardnekkige aanslag van uw beugel of gebitsprothese. Let op: alleen voor uitwendig gebruik. 1x per week echt goed schoon met Ecosym Week en de Ecosym box

Gebruiksaanwijzing:

- vul de bodem van de Ecosym box met Ecosym Week (3 á 4 dopjes)
- neem je prothese / beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water
- leg je prothese / beugel op het 'rooster' van de Ecosym box
- vul de Ecosym box met lauw water totdat je prothese / beugel onder water staat
- laat je prothese / beugel zo ongeveer 8 uur / één nacht staan
- neem het 'rooster' uit de gebitsbox en spoel de prothese / beugel af met lauw water
- oh ja, maak het bakje en roostertje nog even schoon (afspoelen met warm water)

Ecosym Tandpasta

Ecosym Tandpasta bevat geen schurende ingrediënten en zorgt voor een schoon en fris resultaat. Deze tandpasta is geschikt voor dagelijks gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

- Neem de prothese uit uw mond en spoel deze af met water om voedselresten te verwijderen en voor bevochtiging
- Breng 1,5 cm tandpasta op uw tandenborstel aan
- Poets gedurende 2 minuten schoon aan beide kanten
- Spoel goed af met lauw water en plaats de prothese terug in uw mond

Ecosym Tandpasta is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Ecosym Fix Kleefpasta

Ecosym Fix Kleefpasta is geschikt voor (gedeeltelijke) gebitsprothesen. Ecosym Fix Kleefpasta zorgt naast sterke en langdurige kleefkracht voor meer draagcomfort, aangezien voedselrestjes tussen de prothese en gehemelte worden voorkomen.

Ecosym Fix Kleefpasta is geschikt voor dagelijks gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen:

- Reinig voor gebruik de prothese zorgvuldig met Ecosym Dag en droog deze goed af met een schone, droge handdoek
- Breng 2 tot 3 korte streepjes van circa 1 cm op de prothese. Gebruik niet teveel, anders gaat de pasta over de rand lekken. Na een paar keer proberen weet u zelf wat voor u de beste hoeveelheid is.
- Plaats de prothese in de mond, houd even goed vast en bijt een paar seconden om de prothese vast te zetten. Wacht daarna 15 minuten met eten.

Verwijderen:

- Spoel de mond en verwijder de prothese door deze langzaam heen en weer te bewegen
- Verwijder restjes kleefpasta met warm water en de Ecosym borstel
- Reinig de prothese met Ecosym Dag